

Produkt: IVN DM Spray

Datum: 29.10.2015

Gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel, alkoholfrei

Hersteller: IVN Nettetal, D-41334 Nettetal, info@corpusan.com

Präparatetyp: IVN DM Spray ist ein gebrauchsfertiges, schnell wirkendes Präparat zur Reinigung und Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen und Gegenstände in medizinischen Einrichtungen. Ideal zwischen Behandlungen und Eingriffen, wenn kurze Einwirkzeiten erforderlich sind.

Produkteigenschaften: gebrauchsfertig, schnell und umfassend, bereits in 60 Sek. Wirksam, rückstandsfrei, angenehmer Geruch, aldehydfrei, sehr gute Materialverträglichkeit auch bei empfindlichen Materialien. Geeignet für Acrylglassoberflächen. IVN DM Spray wirkt schnell und umfassend bei sehr niedrigen Anwendungskonzentrationen und ist äußerst wirtschaftlich.

Anwendungsbereiche: Für alle wasserbeständigen Oberflächen und Gegenstände, insbesondere für Geräteoberflächen und Gegenstände in medizinischen Einrichtungen. Auch für Sanitär- und Bäderbereiche, Laboratorien und Industrie, Küchen- und Lebensmittelbereiche.

Anwendungskonzentrationen: IVN DM Spray ist gebrauchsfertig. Die zu desinfizierenden Flächen und Gegenstände sind bis zur vollständigen Benetzung einzusprühen. Einwirkzeit: 60 Sek. Fläche ggf. mit trockenem, sauberen Tuch trockenwischen.

Begutachtungen: Prof.Marth, Graz, Prof Schubert, Frankfurt/Main

Zusammensetzung: Biozide, synergistische Additive, Hilfsstoffe.

Toxikologie: Primäre Reizwirkung: An der Haut: Bei längerem und/oder häufigem Hautkontakt sind Reizerscheinungen möglich. Am Auge: Schwache Reizwirkung möglich. Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Chemisch-physikalische Daten: pH-Wert: 7 Dichte: 1,0 g/cm³

Lieferformen: 1-l-Flasche, 5L Kanister, 10 Liter Kanister

Applikationshilfen: Befüllbare Sprühflasche, Kanisterpumpe, Kanisterhahn, Kanisterschlüssel. Zur Beachtung beim Umgang mit der Lösung gem. Gefahrstoffverordnung:

Kennzeichnung: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Beschmutzte/getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Berührung mit der Haut mit viel Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Beim Umgang mit dem Konzentrat Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Berührung mit der Haut vermeiden.

Weitere Angaben: Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Größere Produktreste in der Originalverpackung der Problemabfallentsorgung zu führen. Nur für gewerbliche Verbraucher:

Anmerkungen: Bei Berührung mit den Augen und der Haut gründlich mit viel Wasser abspülen und ggf. Arzt konsultieren. Siehe auch EG-Sicherheitsdatenblatt.

Zur Beachtung: Vorsicht bei wasserempfindlichen Materialien. Beim Umgang mit dem Produkt Gummihandschuhe und Schutzbrille tragen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht rauchen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht über 50°C lagern.

Biologische Abbaubarkeit: IVN DM SPRAY ist nach den Richtlinien der OECD gut biologisch abbaubar. Die Gebrauchslösung kann mit dem allgemeinen Abwasser entsorgt werden. Bei sachgemäßer Einleitung ist eine Störung der biologischen Kläranlagen nicht zu erwarten. Gemäß EG-Richtlinie ist IVN DM SPRAY nicht als umweltgefährdend einzustufen. Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z.B. in Hinsicht auf Materialverträglichkeit sind nur gesondert möglich. Unsere Empfehlungen befreien unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Präparate auf ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke und Verfahren. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen.